

Ihre orthopädischen Einlagen sind hochwertige Hilfsmittel, die von uns in die Handarbeit individuell für Ihre Füße gefertigt wurden.

Gebrauchsanweisung Einlagen

Einsatz und Gebrauch

- Tragen Sie bitte ausschließlich Schuhe mit Ihren Einlagen, auch im Haus und während der Freizeit.
- Tragen Sie ihre Einlagen zunächst nur einen halben Tag, steigern Sie die Tragedauer von Tag zu Tag.
- Bei Druckstellen oder Entzündungen am Fuß suchen Sie bitte umgehend Ihren Orthopädie-Fachmann auf.
- Alle Veränderungen oder Entzündungen am Fuß erfordern die Begutachtung durch Ihren Arzt oder durch Ihren Orthopädie- Fachmann.
- Lassen Sie ihre Einlagen nach 6 bis 12 Monaten durch Ihren Orthopädie- Fachmann kontrollieren.
- Bei Kindern ist unbedingt auch das Wachstum zu achten; eine zu kleine Einlage kann großen Schaden anrichten, daher ist in jedem Fall der Orthopädie- Fachmann aufzusuchen.
- Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des Medizinproduktegesetzes und entspricht den Anforderungen des Anhangs der EG- Richtlinie 93/42/EWG.
- Das Tragen der Einlagen in Sicherheitsschuhwerk kann die Sicherheitsform verändern, deshalb wird ggf. eine separate, zusätzliche Eigenschaft benötigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Orthopädie- Fachmann, Ihren Sicherheitsbeauftragten oder an die Berufsgenossenschaft.

Reinigung und Pflege

- Wenn die Einlagen feucht geworden sind, achten Sie darauf, dass sie langsam trocknen und keinen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Einlagen dürfen nicht über 50°C erhitzt werden.
- Microfaser- und Kunststoffbezüge können mit einem feuchten Tuch oder unter Zugabe eines leichten Desinfektionsmittels abgerieben werden.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.