

# Gebrauchsanweisung für Mieder

Vielen Dank für das Vertrauen

Dieses Medizinprodukt ist eine Sonderanfertigung. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Sanitätshaus Mayer, von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

## Bitte beachten

Nach einem anfänglichen Tragezeitraum von einer bis zwei Woche(n) gewöhnen sich die Patienten rasch an das Tragen des Mieders. Beschwerden, besonders nach einer längeren Zeit, in welcher der Patient das Mieder ohne Probleme getragen hat, sollten dem Sanitätshaus Mayer oder Arzt gemeldet werden. Im Fall eines Kindes könnte dies darauf hinweisen, dass der Patient aus seinem Mieder herausgewachsen ist. Rötungen oder Anzeichen von Reizung, die nicht spätestens 20 Minuten nach Abnahme des Mieders verschwinden, können auf ein Passungsproblem hinweisen, das behoben werden muss. In diesem Fall das Mieder nicht

wieder tragen und Sanitätshaus Mayer oder Arzt kontaktieren.

## Anwendung/Hinweis

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- bei längeren Ruhephasen nicht zu fest verschließen z.B. beim Schlafen
  - bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
  - bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Sanitätshaus Mayer aufsuchen
  - Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
  - gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
  - keine Änderungen am Produkt vornehmen
  - nicht auf offenen Wunden tragen
  - nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
  - kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
  - während der Tragedauer der Orthese: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören
- Das hätte ich entfernt und bei „bitte beachten“ noch fehlendes hineingeschrieben?

## Nutzungsdauer / Lebensdauer

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und

anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt bzw. bei Wachstum.

Durch den täglichen Gebrauch des Hilfsmittels ist das verwendete Material und die verwendeten Bauteile einer starken Belastung ausgesetzt. Dies kann zu Materialermüdung, Lockerung von Bauteilen oder zu kosmetischen Formveränderungen führen. Um der Problematik des Funktionsverlustes Ihrer Versorgung aktiv entgegen zu wirken, empfehlen wir Ihnen einen **Service alle 6 Monate (passt das?)** an dem(n) von uns gebauten Hilfsmittel(n) durchführen zu lassen. So können wir Materialschäden oder Materialverschleiß frühzeitig erkennen und beheben.

## Reinigungshinweise

- Handwäsche >30 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Nicht chemisch reinigen
- Klettverschlüsse schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden
- Desinfizierbar

## Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an uns, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw.

entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt

**? benötigen wir das, was rot ist ?**

### **Meldepflicht**

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Arzt oder uns als Hersteller  
Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung.

### **Entsorgung**

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

### **Konformitätserklärung**

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht

### **Sanitätshaus Mayer**

Dr.-Anton-Schneider-Str. 5a  
A-6850 Dornbirn  
Tel.: 055 72 – 550 50  
Email: [office@orthopaediemayer.at](mailto:office@orthopaediemayer.at)