

# Gebrauchsanweisung Für Sonderanfertigung

- Lagerungsorthese/-n
- Korsett
- Prothese/-n

Vielen Dank für das Vertrauen

Dieses Medizinprodukt ist eine Sonderanfertigung. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Sanitätshaus Mayer, von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

## Bitte beachten

Nach einem anfänglichen Tragezeitraum von einer bis zwei Woche(n) gewöhnen sich die Patienten rasch an das Tragen der Orthese. Beschwerden, besonders nach einer längeren

Zeit, in welcher der Patient die Orthesen ohne Probleme getragen hat, sollten dem Sanitätshaus Mayer oder Arzt gemeldet werden. Im Fall eines Kindes könnte dies darauf hinweisen, dass der Patient aus seiner Orthese herausgewachsen ist. Rötungen oder Anzeichen von Reizung, die nicht spätestens 20 Minuten nach Abnahme der Orthese verschwinden, können auf ein Passungsproblem hinweisen, das behoben werden muss. In diesem Fall die Orthese(n) nicht wieder tragen und Sanitätshaus Mayer oder Arzt kontaktieren.

## Anwendung/Hinweis

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- bei längeren Ruhephasen nicht zu fest verschließen z.B. beim Schlafen
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Sanitätshaus Mayer aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Orthese: keine

lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

Das hätte ich entfernt und bei „bitte beachten“ noch fehlendes hineingeschrieben?

## Nutzungsdauer / Lebensdauer

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt bzw. bei Wachstum.

Durch den täglichen Gebrauch des Hilfsmittels ist das verwendete Material und die verwendeten Bauteile einer starken Belastung ausgesetzt. Dies kann zu Materialermüdung, Lockerung von Bauteilen oder zu kosmetischen Formveränderung führen. Um der Problematik des Funktionsverlustes Ihrer Versorgung aktiv entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen eine Kontrolle alle 6 Monate an dem(n) von uns gebauten Hilfsmittel(n) durchführen zu lassen. So können wir Materialschäden oder Materialverschleiß frühzeitig erkennen und beheben.

## Reinigungshinweise

- Handwäsche >30 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Nicht chemisch reinigen
- Klettverschlüsse schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden
- Desinfizierbar

## **Gewährleistung**

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an uns, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten.

Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise, eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt sowie wenn während der Therapiezeiten kein Schuh über die Stütze getragen wird.

Gerne sind wir Ihnen behilflich bei der Wahl passender Schuhe.

## **Meldepflicht**

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Arzt oder uns als Hersteller. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung.

## **Entsorgung**

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

## **Sanitätshaus Mayer**

Riedgasse 68

A-6850 Dornbirn

Tel.: 055 72 – 550 50

Email: [office@orthopaediemayer.at](mailto:office@orthopaediemayer.at)

Web: [www.orthopaediemayer.at](http://www.orthopaediemayer.at)